

# Linget' Anios

NETTOYANTES  
ET DÉSINFECTANTES

## INDICATIONS


Les LINGET'ANIOS sont imprégnées d'une solution nettoyante et désinfectante, pour le traitement des dispositifs médicaux entre deux patients. Agréablement parfumées.

## COMPOSITION

Ethanol, digluconate de chlorhexidine, N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine, parfum de synthèse, excipients.

## MODE D'EMPLOI

Lingettes à usage unique prêtes à l'emploi pour usage professionnel. Appliquer la LINGET'ANIOS sur la zone à traiter. Laisser agir selon l'activité antimicrobienne recherchée. Ne pas rincer. Bien refermer l'emballage après chaque ouverture.

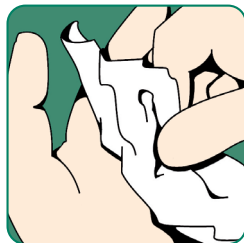

## CONDITIONNEMENTS

- La grande boîte distributrice avec recharges de 120 lingettes de 140 x 190 mm

Carton de 1 boîte + 3 recharges ..... Réf : 299.303  
Carton de 1 boîte + 6 recharges ..... Réf : 299.306  
Carton de 12 recharges ..... Réf : 299.312

- La petite boîte distributrice avec recharges de 120 lingettes de 70 x 100 mm

Carton de 1 boîte + 3 recharges ..... Réf : 299.203  
Carton de 1 boîte + 6 recharges ..... Réf : 299.206

## DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES

La solution d'imprégnation LINGET'ANIOS est :

- Limpide incolore
- Densité à +20°C : ≈ 0,934
- pH : ≈ 6

## PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

la solution d'imprégnation des LINGET'ANIOS est :

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	EN 1040, EN 1276	5 min.
Levures	EN 1275, EN 1650	5 min.
Virus	HIV-1, Herpès virus	1 min.
	HBV	15 min.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - Respectez les précautions d'emploi (Etablies selon la Directive 99/45/CE et ses adaptations).  
Stockage entre +5°C et +25°C



