

# BANDELETTES DE CONTROLE DE LA DILUTION DU BAIN

## Pour solution d'ANIOSEPT ACTIV

### INDICATION

Contrôle de la dilution du bain d'ANIOSEPT ACTIV.

### CONDITIONS DE STOCKAGE

Les bandelettes sont stables 18 mois si elles sont stockées dans un endroit sec et frais, à une température inférieure à +30°C;

Conserver le flacon fermé afin de garantir la durabilité des bandelettes.

### MODE D'EMPLOI

- Utiliser la bandelette de contrôle pour validation de la dilution de la poudre  
En début de séance ou à la reprise d'activité après interruption.  
Toutes les 4 heures d'activité consécutive (au-delà de 10 endoscopes par jour).  
En cas d'activité importante ou de conditions particulières (élévation de température...), il peut être nécessaire d'augmenter la fréquence d'utilisation de ces bandelettes.
- Tremper totalement la partie réactive de la bandelette, dans la solution à tester durant 5 secondes.
- Eliminer l'excès de solution par une légère agitation de la bandelette.
- Lire le résultat 15 secondes après trempage.  
Ne plus interpréter un résultat obtenu pour une lecture réalisée plus de 20 secondes après trempage.



## CONTROLE DE LA BANDELETTE

Coloration vert clair

▶ Solution à 0.5%



Coloration vert foncé

▶ Solution à 1%



Coloration bleue

▶ Solution à 2%

