

# HEXANIOS G+R

Détergent  
Pré-désinfectant  
de l'instrumentation

PRODUIT  
A DILUER  
25 ml > 5L



0,5%  
15 min.




## INDICATIONS

- Nettoyage et pré-désinfection des instruments chirurgicaux et médicaux, des dispositifs médicaux, des instruments thermosensibles et du matériel d'endoscopie.
- Ramassage de l'instrumentation souillée.

## PROTOCOLE D'UTILISATION

### INSTRUMENTATION

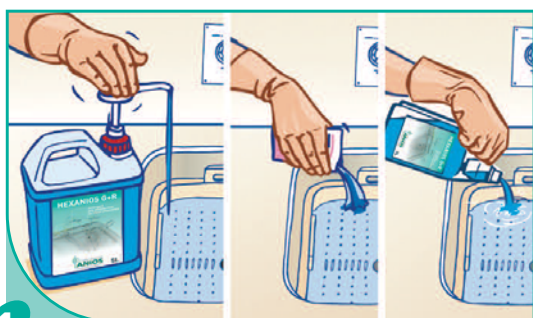

1

**Dilution à 0,5%** : verser une dose de 25 ml pour 5 litres d'eau froide ou tiède.



2

15 min.

Immerger complètement le dispositif médical.  
Temps de trempage minimum : **15 minutes**.  
Brosser, écouvillonner si nécessaire.



3

Rincer soigneusement et abondamment à l'eau de réseau.

#### -> Matériel autoclavable :

Sécher soigneusement à l'aide d'un champ propre et passer à l'étape suivante (voir procédure interne à l'établissement).

Dangereux - respectez les précautions d'emploi.  
Le statut réglementaire des produits (dispositif médical ou produit biocide) est précisé sur l'étiquette