

# HEXANIOS G+R

Détergent  
Pré-désinfectant  
de l'instrumentation

PRODUIT  
A DILUER  
25 ml > 5L




0,5%  
15 min.



## INDICATIONS


- Nettoyage et pré-désinfection des instruments chirurgicaux et médicaux, des dispositifs médicaux, des instruments thermosensibles et du matériel d'endoscopie.
- Ramassage de l'instrumentation souillée.

## PROTOCOLE D'UTILISATION ENDOSCOPIE

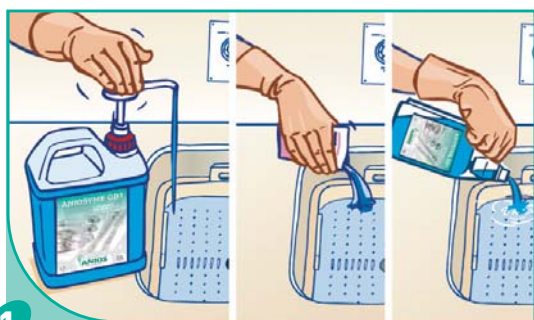

1

**Dilution à 0,5 % :** Verser une dose de 25 ml pour 5 litres d'eau froide ou tiède.

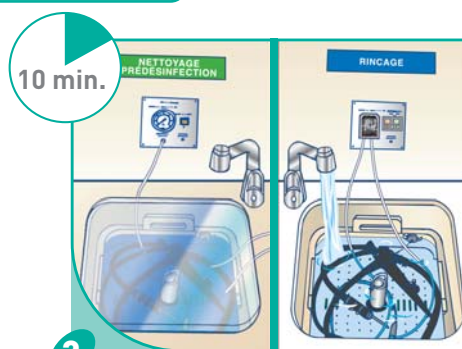


2

**Premier nettoyage :** Immerger complètement le dispositif médical. Temps de trempage minimum : **10 minutes**. Brosser si nécessaire. Irriguer les canaux et rincer soigneusement à l'eau de réseau (de bonne qualité microbiologique), l'extérieur et l'intérieur du dispositif médical.

→ **Matériel thermosensible :**  
Passer à l'étape suivante (voir procédure interne à l'établissement)

→ **Matériel autoclavable :**  
Sécher soigneusement à l'aide d'un champ propre et passer à l'étape suivante (voir procédure interne à l'établissement).

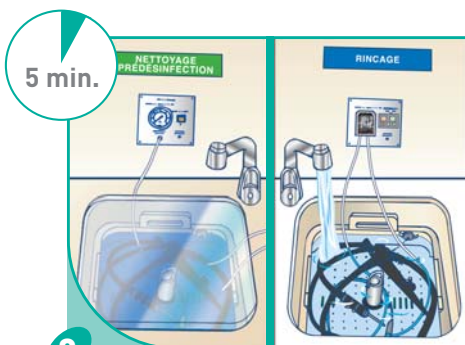

2

**Second nettoyage :** Immerger complètement le dispositif médical. Temps de trempage minimum : **5 minutes**. Irriguer et rincer soigneusement à l'eau de réseau (de bonne qualité microbiologique), l'extérieur et l'intérieur du dispositif médical.

Dangereux - respectez les précautions d'emploi.  
Le statut réglementaire des produits (dispositif médical ou produit biocide) est précisé sur l'étiquette