

# BANDELETTES DE CONTROLE

## Pour solution STERANIOS OPA

### INDICATIONS

Contrôle de la concentration du STERANIOS OPA au sein d'une solution de désinfection totale à froid du STERANIOS OPA.

### MODE D'EMPLOI

- Utiliser la bandelette de contrôle pour validation de l'activité du bain :  
En début de séance ou à la reprise d'activité après interruption.  
Toutes les 4 heures d'activité consécutive (au-delà de 10 endoscopes par jour).  
En cas d'activité importante ou de conditions particulières (élévation de température...), il peut être nécessaire d'augmenter la fréquence d'utilisation de ces bandelettes.
- Tremper totalement la partie réactive de la bandelette, dans la solution à tester durant 2 secondes.
- Eliminer l'excès de solution par une légère agitation de la bandelette.
- Lire le résultat 120 secondes après trempage.

### CONDITIONS DE STOCKAGE

- Les bandelettes sont stables :
- 24 mois si elles sont stockées entre 2 et 8°C.
  - 90 jours après ouverture.

Date d'ouverture :

### INFO

**La lecture doit être effectuée 120 secondes (2 minutes) après immersion.  
Le non respect des conditions peut entraîner une erreur d'interprétation du résultat.**

Même coloration  
ou plus intense :

**CONFORME**

Coloration moins intense :

**NON CONFORME**

