


Abri-Form Premium M3

INCONTINENCE

ABRI-FORM Premium



70 - 110 cm

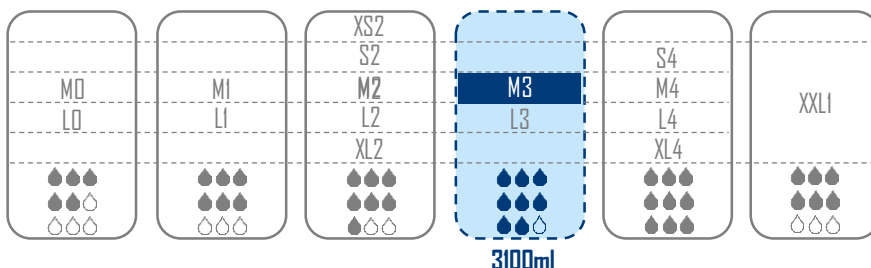

UTILISATEURS

SEMI-AUTONOME

ALITÉ

INCONTINENCE LOURDE

Nouveauté 2020

Dual Wrapped Core - Cœur absorbant enveloppé



La technologie Dual Wrapped Core consiste à positionner et optimiser la zone absorbante là où elle est le plus nécessaire. A l'intérieur du coussin absorbant, le « cœur absorbant » est enveloppé d'un film non-tissé. Il est injecté de microbilles superabsorbantes (SAP) aux points précis où les liquides devraient être absorbés. Cette technologie offre une absorption totale précisément où elle est demandée, au centre du coussin absorbant. L'enveloppement du « cœur absorbant » permet une meilleure stabilité globale du coussin. Ce qui permet de limiter les risques de déstructuration du coussin tout en offrant une protection optimale contre les fuites.

Top Dry - Couche d'acquisition pour effet garde-au-sec



La couche d'acquisition est située entre le coussin absorbant et la voile externe supérieure. Elle se compose d'un alliage de fluff et non-tissé. Sa fonction est d'améliorer l'absorption rapide du liquide et de favoriser sa répartition sur une zone plus large, ralentissant ainsi la saturation du change. Hydrophile, la couche d'acquisition laisse pénétrer le liquide mais l'empêche de ressortir, permettant ainsi à la surface interne du change de rester sèche.

Système anti-odeurs



Les agents super absorbants (SAP) absorbent le liquide et capturent les odeurs à l'intérieur du change.

Barrières anti-fuites



Les barrières anti-fuites hydrophobes sont situées au niveau des jambes et permettent un ajustement parfait du change à la morphologie de l'utilisateur.

Air Plus - Voile externe respirant




La voile externe (BTBS) laisse la peau respirer, garantissant son intégrité et limitant les risques de dermatites associées à l'incontinence.

Adhésifs extensibles et repositionnables



Les adhésifs extensibles offrent un confort d'utilisation optimal pour un ajustement parfait à la morphologie de l'utilisateur. Repositionnables, ils ne déchirent pas la protection une fois retirés.

Témoin de saturation

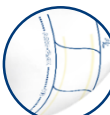


Les bandes jaunes deviennent bleues au contact du liquide. L'échelle graduée permet de déterminer le niveau de saturation facilement.

Abri-Form Premium M3

DONNÉES TECHNIQUES

Coeur absorbant	100% fluff de cellulose non blanchi au chlore (ECF free)
Sous-couche	Couche d'acquisition, non-tissé blanc
Non-tissé	Polypropylène (PP), hydrophile permanent
Barrières	Polypropylène (PP), non-tissé hydrophobe
Elastiques	Elasthanne, sans latex
Voile externe	Voile externe textile respirant (BTBS, Breathable Backsheet)
Adhésif (colle)	Pulvérisée à chaud entre les couches, à base de résine et de cire, sans phtalates
SAP	Super absorbant, polyacrylate, sans phtalates
Marquages	N° de série imprimé sur la voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.

DIMENSIONS PRODUIT

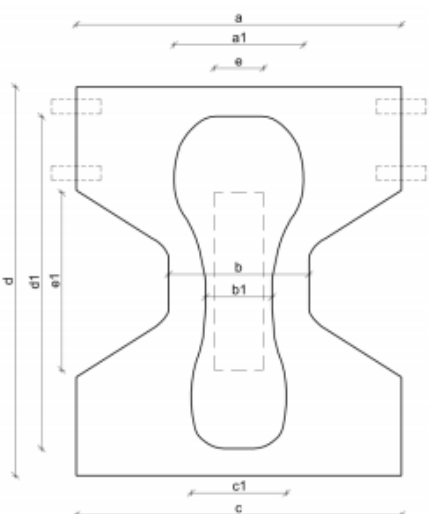

d	Longueur	820 mm
a	Largeur, devant	670 mm
c	Largeur, arrière	670 mm
b	Largeur, entre-jambes	320 mm
<i>Cœur absorbant</i>		
d1	Longueur	690 mm
a1	Largeur, devant	191 mm
c1	Largeur, arrière	260 mm
b1	Largeur, entre-jambes	160 mm
<i>Sous-couche (ADL)</i>		
e1	Longueur	360 mm
e	Largeur	120 mm

ABSORPTION

Poids produit : 132g

Test Rothwell ISO 11948-1	3100 ml
Absorption Méthode Hy-tec PA02/02	-
Temps d'absorption Méthode Hy-Tec PA02/03	-
Rewet Méthode Hy-Tec PA02/04	-



Dispositif médical
Classe I 93/42/CEE



Ecolabel Nordic Swan
Produits respectueux de
l'utilisateur et de son
environnement



Testé dermato-
logiquement
Produits sans risques d'irritation



ISO 9001
ISO 14001

OHSAS 18001:2008

Management de la santé
et de la sécurité au
travail



GMP
Good Manufacturing
Practices



Abri-Form Premium M3




DONNÉES LOGISTIQUES

Sachets / Carton	Pcs / Sachet	Pcs / Carton	
4	22	88	
Cartons / Palette	Hauteur palette	Cartons / Palette gerbée	
12	1,25 m	24	
EAN Sachet		EAN Carton	
57 03538 759574		57 03538 759581	
Dimensions carton	Poids brut carton	Poids net carton	Dimensions sachet
58 x 40 x 37 cm	12 464 g	11 616 g	37 x 17 x 27 cm


GUIDE D'UTILISATION

POSITION COUCHÉE



- Former une gouttière en pliant le change sur sa longueur. Ne pas toucher l'intérieur de la protection.
- Placer le résident sur son côté.
 - A - Positionner la protection, « gouttière » en main, entre les jambes.
 - B - Ajuster la face arrière du change.
- Utilisateur sur le dos. Ajuster la face avant du change. Rabattre les flans arrière sur la partie avant et fixer les attaches du bas. S'assurer que le change soit maintenu étroitement sur le corps.
- A - Fixez les attaches hautes en les orientant vers le bas.
 - B - Ajuster les bords autour de l'aîne.

POSITION DEBOUT



- Toujours veiller à faire la gouttière. S'assurer que le résident soit bien en appui. Glisser la protection, « gouttière » en main, entre les jambes.
- Maintenir la partie arrière de la protection avec la jambe. Tirer la face avant du change. Fixer les attaches basses sur la face avant.
- Fixer les attaches hautes en les orientant vers le bas. Ajuster les bords du change autour de l'aîne.

PRODUITS ASSOCIÉS



Découvrez la gamme complète de soins de la peau et d'essuyage corporel ABENA

www.abena-frantex.fr

